

Registra il tuo strumento per aiuto e assistenza:  
[OneTouch.it/benvenuto](http://OneTouch.it/benvenuto)



## Guida rapida

Sistema di monitoraggio della glicemia OneTouch Select Plus Flex™

Utilizza questa guida per conoscere il tuo strumento e segui i passaggi indicati per iniziare.



**IMPORTANTE:** leggere il Manuale per l'utente fornito con il sistema.



AW 07017403A

ONETOUCH®

# 1

## Impostazione dell'ora e della data sullo strumento

Accendere lo strumento

Tenere premuto **OK** fino alla visualizzazione della schermata d'avvio.

Usare i pulsanti **↓** **↑** per modificare ciascuna impostazione, poi premere **OK** per confermare.

Impostare l'ora nella prima schermata SET

> L'ora lampeggia. Premere **OK** se l'ora è corretta, oppure modificarla e poi confermarla.

> I minuti lampeggiano. Premere **OK** se i minuti sono corretti, oppure modificarli e poi confermarli.

Impostare la data nella successiva schermata SET

> L'anno lampeggia. Premere **OK** se l'anno è corretto, oppure modificarlo e poi confermarlo.

> Il mese lampeggia. Premere **OK** se il mese è corretto, oppure modificarlo e poi confermarlo.

> Il giorno lampeggia. Premere **OK** se il giorno è corretto, oppure modificarlo e poi confermarlo.

Pronto per il test

L'impostazione dello strumento è completa quando appare la schermata con 3 linee tratteggiate.



# 2

## Esecuzione di un test


Barre di contatto



Porta per la striscia reattiva


Inserire una striscia reattiva nell'apposita porta, tenendo le barre di contatto rivolte verso di sé.

Canale capillare

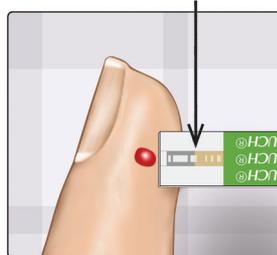

Allineare la striscia reattiva alla goccia di sangue in modo che il canale capillare sul bordo della striscia reattiva tocchi delicatamente la goccia di sangue.

Finestra di conferma piena

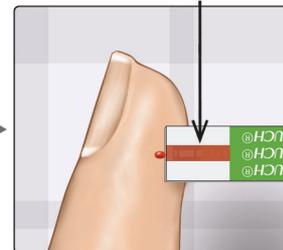

La goccia di sangue verrà aspirata nel canale capillare e la finestra di conferma si dovrebbe riempire completamente.

3

### Visualizzazione del risultato



Esempio di risultato che rientra nell'intervallo

Il risultato appare sul display. La freccia dell'indicatore di intervallo indica la barra blu, verde o rossa dell'indicatore di intervallo, per comunicare rispettivamente che il risultato è inferiore ai limiti dell'intervallo, compreso fra essi o superiore a essi.



Esempio di risultato inferiore all'intervallo



Esempio di risultato superiore all'intervallo

4

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
### Opzionale: connessione a un dispositivo mobile

Lo strumento è dotato di tecnologia **Bluetooth®** Smart. Grazie ad essa, i risultati possono essere inviati in modalità wireless a un dispositivo mobile, come ad esempio un cellulare o un tablet, sul quale leggerli e visualizzarli graficamente.


Per avere maggiori informazioni sull'uso della funzionalità wireless dello strumento e per visualizzare un elenco completo dei dispositivi e delle applicazioni software compatibili, visitare il nostro sito [www.LifeScan.it](http://www.LifeScan.it).

#### Connessione dello strumento

Premere contemporaneamente **OK** e **^** per attivare e disattivare la funzione **Bluetooth®**. Quando richiesto dal dispositivo mobile, digitare sul dispositivo il PIN indicato sullo strumento.



Il simbolo  indica che la funzione **Bluetooth®** è attiva.

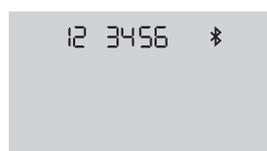


Esempio di PIN.

#### Simboli dello strumento


	Alimentazione strumento		Funzione <b>Bluetooth®</b> attivata
	Batteria quasi scarica		Modalità Storia (risultati precedenti)
	Batteria completamente scarica		Applicare campione
	Soluzione di controllo		Freccia dell'indicatore di intervallo
	Sincronizzazione	<b>SET</b>	Modalità di impostazione

### Informazioni sull'indicatore di intervallo

Lo strumento dispone di un indicatore di intervallo che mostra automaticamente se il risultato è inferiore, superiore o compreso nei limiti dell'intervallo. Per impostazione predefinita, il limite alto e il limite basso dell'intervallo usati dall'indicatore di intervallo sono i seguenti.

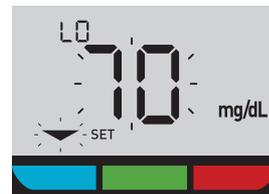

Limite preimpostato basso dell'intervallo

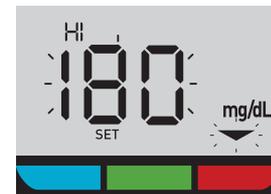

Limite preimpostato alto dell'intervallo

Per i dettagli su come modificare i limiti preimpostati dell'intervallo, fare riferimento al Manuale per l'utente.

Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a LifeScan Scotland Ltd. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



LifeScan Deutschland GmbH  
Niederkaßeler Lohweg 18  
40547 Duesseldorf, Germany

Contattare il Servizio clienti LifeScan al numero 800-822000.  
Il servizio è operativo da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 19,00.  
Oppure visitare il sito [www.LifeScan.it](http://www.LifeScan.it).

**LifeScan**

LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug  
Switzerland

Data di rev.: 03/2023  
© 2018-2023 LifeScan  
IP Holdings, LLC  
AW 07017403A

CE  
0344



**ONE TOUCH®**