

ONETOUCH Select[®] Plus

Sistema di monitoraggio della glicemia




Manuale per l'utente

Istruzioni per l'uso

Le informazioni contenute in questo manuale sono coperte da uno o più di questi brevetti registrati negli USA: 6,733,655, 7,462,265, 7,468,125, 8,066,866, 8,093,903, 6,602,191, 6,976,958 e 7,156,809. L'acquisto di questo strumento non garantisce la concessione di una licenza di utilizzo in relazione a detti brevetti. Tale licenza viene concessa soltanto quando lo strumento viene utilizzato con le strisce reattive OneTouch Select® Plus. Solo LifeScan e nessun altro fornitore di strisce reattive è autorizzato a concedere tale licenza. L'accuratezza dei risultati ottenuti con strumenti LifeScan utilizzando strisce reattive non prodotte da LifeScan non è stata valutata da LifeScan.

Gli strumenti di automonitoraggio della glicemia LifeScan sono conformi alle seguenti direttive europee:

IVDD (98/79/CE):


 Strumento per la determinazione della glicemia, strisce reattive e soluzione di controllo

MDD (93/42/CEE):

 Lancette

 Dispositivo pungidito

Contattare il Servizio Clienti OneTouch® al numero 800-822000. Il servizio è operativo tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 8:30 alle 19:00. Oppure visitare il sito www.OneTouch.it.

 LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Lifescan 



AW 06847105A



AW 06847105A
© 2018–2020 LifeScan
IP Holdings, LLC
Data di rev.: 02/2020